

# МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

## A-Medical-36UVM Bactelator

1. Извлечь светильник из упаковки. Проверить внешний вид светильника на предмет отсутствия механических повреждений.
2. Приложить корпус светильника к установочной поверхности, и произвести разметку двух отверстий. Диаметр крепежных отверстий – 7 мм.
3. Снять заглушку 1 с корпуса светильника. Бактерицидные лампы вытащить из патронов-держателей и освободить лампы от упаковки. Поставить лампы обратно в патроны-держатели. Прикрутить заглушку 1 к корпусу.
4. Выполнить отверстия на установочной поверхности и закрепить на ней рециркулятор.
5. Рециркулятор также можно установить на подставку (заказывается отдельно). Для этого открутить монтажные кронштейны и прикрутить рециркулятор на подставку, используя те же крепежные отверстия.
6. Для замены УФ-ламп необходимо демонтировать светильник и снять заглушку 1. О времени замены сообщит счетчик звуковым сигналом.
7. Для замены фильтра необходимо снять заглушку 2. О необходимости замены также сообщит счетчик звуковым сигналом.

